

Vejledning

Før påbegynder formstøbningen af dine nye Ahead ACME ørepropper, bør du læse denne vejledning grundigt igennem.

1. Vask dine hænder og rens dine ører
2. Sørg for at have et spejl klar
3. Luk emballagen op og læs den medfølgende brugsanvisningen grundigt igennem før start
4. Luk de to beholdere op og del hver beholders indhold i to ligestore klumper
5. Tag nu en klump af hver farve og ælt dem sammen. Når du får en helt jævn og ens farve er materialet klar til brug. Det tager ca. 45 sekunder at få dem æltet ordenligt sammen.
6. Se i spejlet, og sæt kuglen midt på øret (ved indgangen)
7. Sørg for at holde din mund let åbnet og i samme position. Tal ikke og tyg ikke. Det er tilrådeligt at bide om en kuglepen eller lignende.
8. Pres nu forsigtigt materialet ind i det første øre, ved at trykke i center af kuglen. Det materiale der måtte ryge til siderne, foldes ind over midten og presses med ind igen.
9. Når du fornemmer at du har presset nok materiale ind i øret (og der ikke længere slipper lyd ind) kan du fjerne evt. overskydende materiale, for så at glatte overfladen ud efterfølgende. Er du for længe om punkt 9, risikerer du at materialet når at størkne så meget at du ikke længere kan nå at give dine ørepropper en pæn finish på overfladen.
10. Gå nu til punkt 5, og gentag processen for dit andet øre.
11. Vent så i 10-20 minutter. Herefter kan du forsigtigt tage ørepropperne ud - evt. hjulpet på vej ved at løfte lidt op i din øreflip eller dit øre.
12. Lad nu ørepropperne ligge og hvile i ca. 3-4 timer (optimalt et døgn).
13. Dine Ahead ACME ørepropper er nu klar til brug.

Rigtig god fornøjelse!

